



DĚTSKÝ INVALIDNÍ VOZÍČEK

ROZMĚRY

hloubka sedu 36 cm

šířka sedu 34 cm

šířka vozíčku 59 cm

nosnost 70 kg

SKLÁDÁNÍ/PŘEPRAVA

Skládání /rozkládání

Vozík lze skládat bez náradí jenom několika hmaty

- (1). Odklopte podnožku,
- (2). Sedací kurt vytáhněte nahoru

ROZKLÁDÁNÍ VOZÍKU

K rozložení vozík lehce nakloňte k jedné straně. Na straně, která stojí pevně na zemi, zatlačte trubku sedačky dolů až na doraz

Upozornění:

Může se stát, že bude nutné trubky sedačky přitlačit rukou. Dbejte na to, aby trubka sedačky doléhala správně do úchyty.

BRZDA

Zajištěním brzd pomocí páčky je vozík zabezpečen proti nechtěnému rozjezdu – obě brzdové páčky zatlačte dopředu až na doraz.

Kontakty

1. Detašované pracoviště Ostrava

Bieblova 3, 702 00 Ostrava, tlf. 596 115 318