



Uživatelský manuál

EPI - CARE

3000

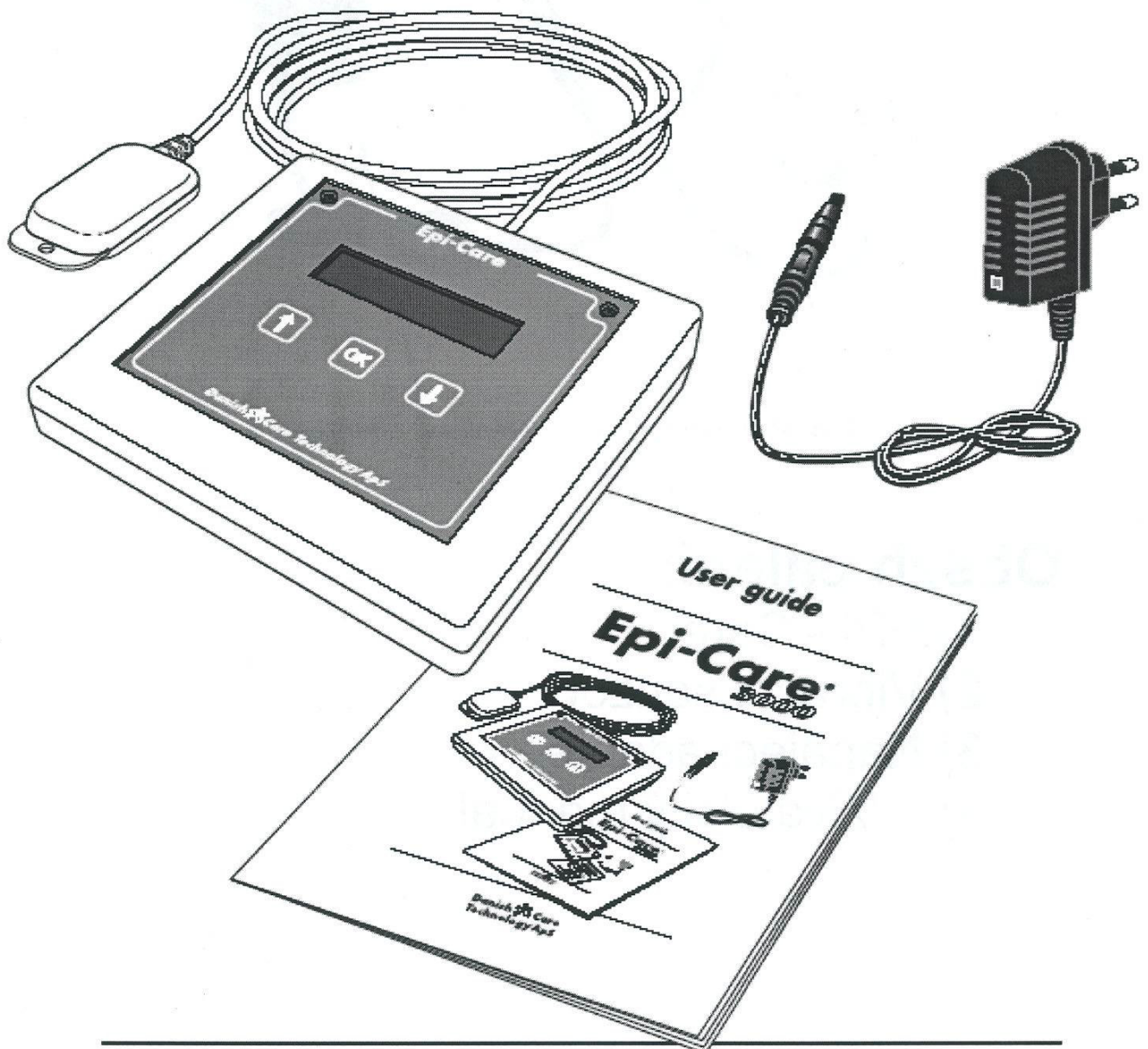


Popis zařízení

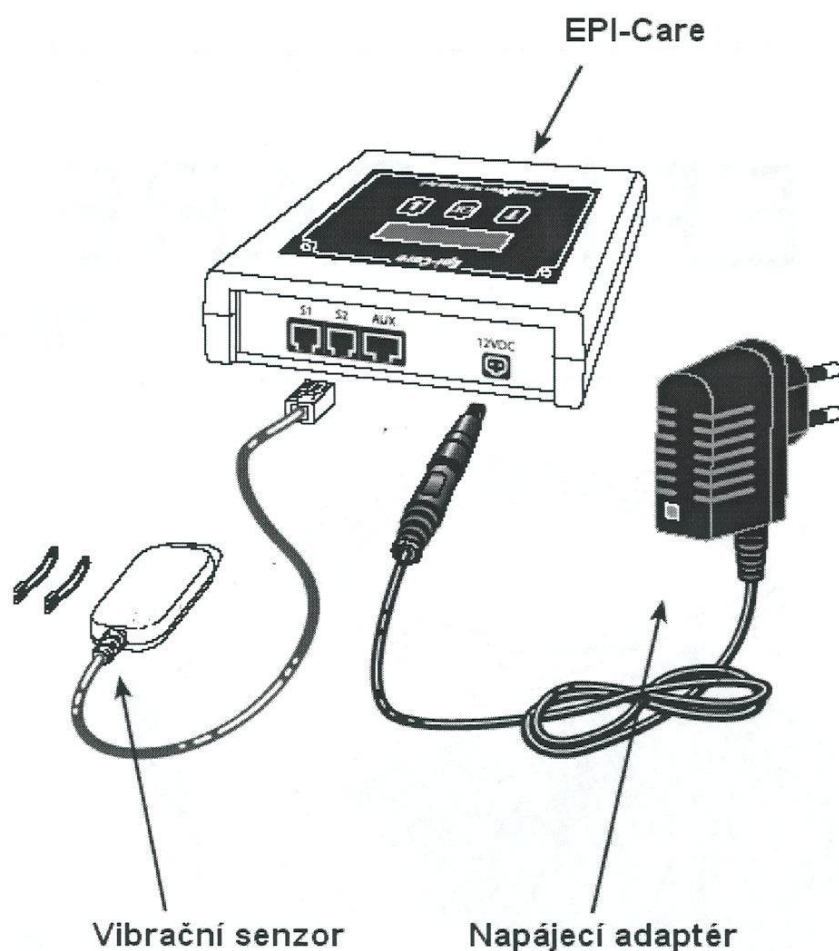

Obsah balení:

- 1) EPI - Care
- 2) Vibrační senzor
- 3) Napájecí adaptér
- 4) Uživatelský manuál

Propojení součástí zařízení

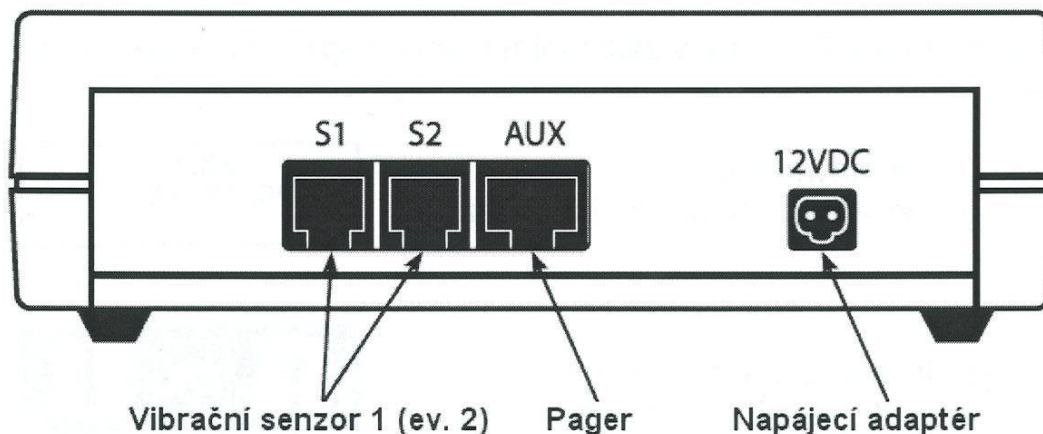


- A) Připojte vibrační senzor.
- B) Připojte externí poplachové zařízení (pager).
- C) Připojte napájecí adaptér.

Nyní je zařízení EPI - Care připraveno k činnosti.

Dále je třeba ještě nastavit citlivost a další vlastnosti - viz. str. 5 – 8.


- D) Umístěte vibrační senzor na vhodné místo - typicky na matraci či pod ni.

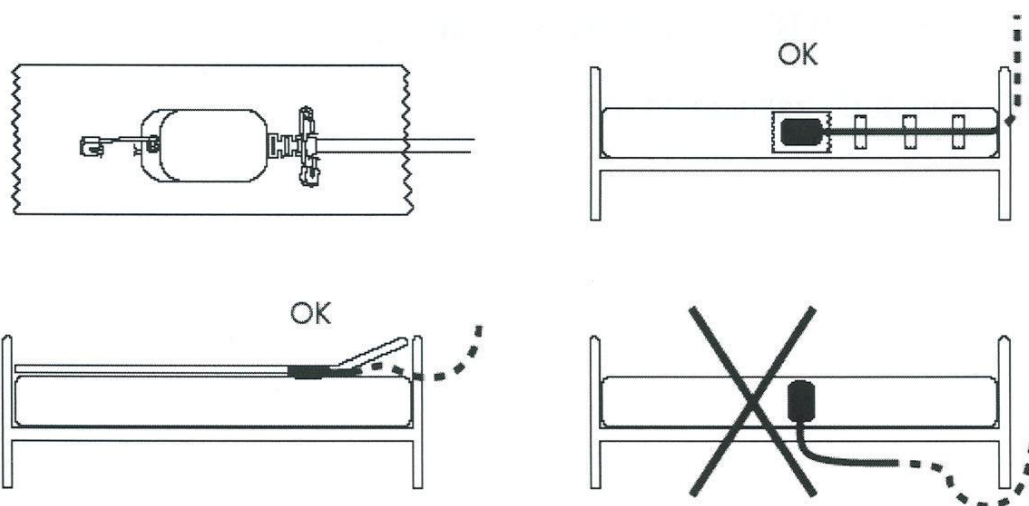


Displej a hlavní menu

Když je přístroj EPI - Care v základním menu, displej zobrazuje čas a počet reportů.

XX:YY hodiny/minuty
ZZ počet reportů uložených v paměti

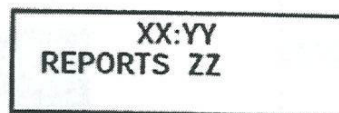

Displej je zkonstruován jako rolovací
K pohybu uvnitř hlavního menu se používají šipky.

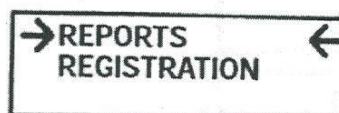

Do hlavního menu se dostanete po stisknutí tlačítka šipka nahoru "↑", nebo tlačítka šipka dolů "↓".



REPORTS

- pro každý report datum, počáteční a konečný čas

MOVEMENT SENSOR - nastavení vlastností vibračního senzoru (senzorů)

OTHER SETTINGS - další nastavení – vstup do dalšího submenu, kde lze nastavit: počet senzorů, hlasitost, intenzita světla a hodiny

DELETE REPORTS - smaže všechny reporty

EXIT - návrat do základního menu

Nastavení zařízení - Menu

NASTAVENÍ ALARMU

Zde je možné nastavit citlivost senzoru a délku trvání děje, který zapne poplach (zároveň se vygeneruje report) nebo pouze vygeneruje report.

Přesuňte se do hlavního menu stisknutím šipky nahoru nebo dolů.

Pomocí šipek najděte položku MOVEMENT SENSOR v hlavním menu. Stiskněte tlačítko OK.

Citlivost - SENSITIVITY

Kvůli eliminování normálních pohybů, je třeba nastavit citlivost vibračního senzoru.

Pomocí šipek najděte položku SENSITIVITY a stiskněte tlačítko OK.

00 - minimální citlivost
10 - maximální citlivost

Stiskněte tlačítko OK.

Pozn.: Jsou li připojeny dva vibrační senzory, platí toto nastavení pro oba.

Časovač - TIMER

Zde se definuje, jak dlouho mohou trvat normální pohyby před spuštěním poplachu (ALARM), resp. zaznamenáním události (REPORT).

Pomocí šipek najděte položku TIMER a stiskněte tlačítko OK.

Pomocí šipek najděte položku ALARM TIMER a stiskněte tlačítko OK.

Zde je možné nastavit délku trvání děje, který zapne poplach (zároveň se vygeneruje report). Tato funkce se používá pro registrování delšího a intenzivnějšího chvění, které může vyvolávat epileptický záchvat, a které tudíž vyžadují dohled. Je možné nastavit čas v rozpětí 0 - 119 sekund.

Vraťte se zpět stiskem tlačítka OK.

Pomocí šipek najdete položku REG. TIMER a stiskněte tlačítko OK.

Zde je možné nastavit délku trvání děje, který způsobí vygenerování reportu (bez poplachu). Tato funkce se používá pro registrování krátkých period chvění, které nevyžadují dohled.

I zde je možné nastavit čas v rozpětí 0 - 119 sekund.

Vraťte se zpět stiskem tlačítka OK. Pomocí šipek najdete EXIT a znovu stiskněte OK.

Vypnutí poplachu - STOP ALARM

Funkce pro vypnutí poplachu.

Poplach se vypíná současným stiskem obou šipek na přístroji.

Reporty

"Report" je záznam případu, kdy byla překročena kritéria nastavená v položce MOVEMENT SENSOR --> SENSITIVITY a zároveň REG. TIMER nebo ALARM TIMER. Zaznamenává se čas a délka trvání děje. Do paměti přístroje se vejde max. 20 reportů, když je paměť plná, postupně se odmazávají nejstarší reporty a nahrazují se nejnovějšími.

Pro prohlédnutí reportů se přesuňte do hlavního menu stisknutím šipky nahoru nebo dolů.


Pomocí šipek si najdete položku REPORTS.

Poté stiskněte tlačítko OK.



```
→ REPORTS ←  
MOVEMENT SENSOR
```

Každý report má pořadové číslo. Zobrazeno je datum události, typ reportu - ALARM (A) nebo REPORT (R), eventuálně PAUSE (P) a číslo vibračního senzoru, který report vyvolal.

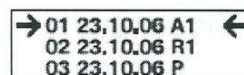

```
→ 01 23.10.06 A1 ←  
02 23.10.06 R1  
03 23.10.06 P
```

Pomocí šipek lze vybrat jeden z reportů, a stiskem tlačítka OK si prohlédnout podrobnosti.

SENSOR	1 ALARM
START:	12:30:06
END:	12:30:36
DATE:	06.07.03
SENSITIVITY:	07

Vraťte se zpět stiskem tlačítka OK. Pomocí šipek najdete EXIT a znovu stiskněte OK.

Mazání reportů - DELETING REPORTS

Zde můžete smazat neaktuální reporty.

Přesuňte se do hlavního menu stisknutím šipky nahoru nebo dolů.

Pomocí šipek najděte položku DELETING REPORTS v hlavním menu. Stiskněte tlačítko OK.

Stiskněte tlačítko "↑" (YES) pro smazání reportů, nebo tlačítko "↓" (NO) pro ponechání reportů v paměti.

Vraťte se zpět stiskem tlačítka OK. Pomocí šipek najděte EXIT a znovu stiskněte OK.

Další nastavení - OTHER SETTINGS

Zde je možné provést další nastavení - lze nastavit: počet senzorů, hlasitost vnitřního alarmu, intenzitu podsvícení, datum a čas.

Přesuňte se do hlavního menu stisknutím šipky nahoru nebo dolů.

Pomocí šipek najděte položku OTHER SETTINGS v hlavním menu a stiskněte tlačítko OK.

Počet senzorů – NO. OF SENSORS

Zde můžete nastavit počet aktivních vibračních senzorů.

Pomocí šipek najděte položku NO. OF SENSORS.

Stiskněte tlačítko OK.

Pomocí šipek nastavte počet aktivních vibračních senzorů od 1 do 2, a stiskněte tlačítko OK.

Hlasitost poplachu - VOLUME

Přístroj EPI-Care je vybaven interním bzučákem s regulovatelnou intenzitou zvuku

Pomocí šipek najděte položku VOLUME. v hlavním menu.

Stiskněte tlačítko OK.

Pomocí šipek je možné hlasitost nastavit takto:

0 = bez zvuku

1 = nízká hlasitost

2 = střední hlasitost

3 = vysoká hlasitost

Stiskněte tlačítko OK.

Datum a čas - CLOCK

Zde je možno nastavit datum a čas

Pomocí šipek najděte položku CLOCK.

Stiskněte tlačítko OK.

Pomocí šipek nastavte postupně hodiny, minuty, rok, měsíc a den, a stiskněte tlačítko OK.

Podsvícení displaye - LIGHT

Zde můžete nastavit podsvícení displaye.

Pomocí šipek najděte položku LIGHT.

Stiskněte tlačítko OK.

Pomocí šipek nastavte úroveň podsvícení od 1 do 4, a stiskněte tlačítko OK.

Technické specifikace

EPI - Care DCE-50800

Napájení: Síťový adaptér - 12 V DC, 700 mA, max. 8 W

Záloha: Zabudovaný 9V NiMH akumulátor

Datum a čas: Hodiny jsou napájeny lithiovou baterií - typ CR3032

Výstup: 8 pole RJ-45

Výstup 12 V DC: Max. 100 mA

Vstup: 2x 6 pole RJ-11 (vstup pro DCT vibrační senzor)

Výrobce

Danish Care Technology A/S

CUC Engineering A/S

Industrivej 29, DK-4200 Slagelse - Denmark



Dodavatel pro ČR



WALTER

GRAPHTEK CZ s.r.o.

Walter Graphtek CZ s.r.o.

Sedlec 40, P.O. Box 7

250 65 Líbeznice

tel: 284 890 568

fax: 284 892 666

e-mail: walter.cz@volny.cz

web: www.walter-graphtek.cz