

MECHANICKÝ SKLÁDACÍ INVALIDNÍ VOZÍK PRO DĚTI

SIVAK typ Šárka - Blade



Technické parametry

Maximální nosnost, včetně vybavení pro uživatele: 51 kg



Kontakty

Detašované pracoviště Nový Jičín

Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín, tlf. 556 709 403

Návod na provoz mechanického vozíku Šárka - Blade

Obdrželi jste speciální mechanický odlehčený dětský vozík Šárka - Blade s rychloupínacími osami zadních kol .

Dříve než vozík začnete používat v plném provozu, měli byste si vyzkoušet a nacvičit pohyby s přistavováním vozíku, nasedáním, vysedáním, jeho skládání a rovněž i přemísťování předmětů v různých situacích.

! POZOR:

- 4 Nepokoušejte se uchopit předměty, musíte-li k tomuto účelu popojet dopředu!
- 4 Nepokoušejte se ze země zvednout předměty, musíte-li se k tomuto účelu nahnout dopředu mezi kola!
- 4 Nenahýbejte se příliš dozadu, chcete-li uchopit předměty ležící za Vámi, mohli byste se převrhnout!
- 4 Nepřesouvejte svoji váhu – nepřesouvejte se v sedací poloze do směru, kam chcete jet: hrozí nebezpečí převrácení!
- 4 Váš vozík je vybaven brzdami zadních kol – přesvědčte se, že fungují, než je použijete!
- 4 Při výstupu i nasedání do vozíku musíte vždy zajistit obě ruční brzdy. Dříve než pohnete nějakým předmětem směrem k nebo do vozíku, musíte učinit veškerá preventivní opatření k tomu, abyste vzdálenost k požadovanému předmětu co nejvíce snížili. Ujistěte se také, že brzdy jsou na kolech vozíku zataženy, aby se kola nemohla pohybovat. Natočte obě přední otočná kola k předmětu, na který chcete dosáhnout. Nesnažte se zabrzdit Váš jedoucí vozík ručními brzdami. Ruční brzdy nemohou zabrzdit jízdní rychlost!
- 4 Nenaklánějte – nesklápějte vozík bez cizí pomoci!
- 4 Nejezděte se svým vozíkem na pohyblivých schodech!
- 4 Nepoužívejte vozík, když máte nedostatečný tlak v pneumatikách!
- 4 Nejezděte s přehustěnými pneumatikami, riskujete jejich prasknutí!

Nosnost vozíku

Doporučený váhový limit je 51 kg. Do tohoto limitu je zahrnuto i další potřebné vybavení pro pacienta (kyslíková láhev a pod.)

Všeobecný popis, manipulace, údržba

Stabilita

Abyste zajistili stabilitu Vašeho vozíku, musíte vždy udržovat rovnováhu. Při každodenním používání zůstane vozík stabilní, jestliže se nenachýlíte přes Vaše těžiště. Doporučujeme Vám, abyste pro větší bezpečnost používali bezpečnostní pásy.

Nepředklánějte se z vozíku dále, než do úrovně područek. Pokud se předkláníte, musíte mít jistotu, že přední otočná kola směřují dopředu. Za tímto účelem popojed'te dopředu a přímo opět dozadu.

Abyste dokázali překonávat v každodenním životě nepříjemné překážky (obrubníky a schody), musíte se naučit obsluhovat vozík a udržovat vlastní rovnováhu.

U uživatele vozíku existuje celá řada činností např. přejíždění a naklonění se z vozíku. Tyto pohyby jsou spojeny se změnou normální rovnováhy, těžiště a rozložení váhy vozíku. Za pomoci odborníka začněte trénovat přijíždění k nějakému předmětu, naklánění a přesouvání Vašeho těla.

Nesklápějte vozík bez cizí pomoci. Jakmile zvládnete techniku sklápění s pomocí asistenta, nacvičte si sami překonávání obrubníků, malých schodů atp.

Výhodou tohoto vozíku je nastavitelnost těžiště, stavitelné područky a lámací zádová opěra. Zadní kola jsou uchycena rychloupínacími náboji v upínacím bloku. Tento je možné přemontovat dle potřeby uživatele do druhé polohy a upravit tak těžiště. K nastavení nebo vyjmutí područek stačí uvolnit pojistku – páčka, která je umístěna vedle područek. Tahem nahoru se uvolní sevření trubek područek a můžete polohovat nebo vyjmout područky úplně. Stlačením páčky zpět dolů se područky opět zajistí. Stlačením pojistek na zádové opěře se zádová opěra „zlomí“ a vozík dosáhne lepší skladovatelnosti.

Schody

Nepokoušejte se vozík nadzvednout za opěrky nebo podnožky, pokud jsou tyto odnímatelné. Při jízdě vozíku na schodech nahoru nebo dolů buďte mimořádně opatrní. Doporučujeme raději dva pomocníky a velkou opatrnost. Nejezděte s vozíkem po pohyblivých schodech!

Přesedání na jiná sedadla

Při přesedání se musíte co nejvíce posadit ve vozíku dozadu. Takto nemůžete zlomit žádné šroubky, poškodit potah sedadla nebo převrátit vozík dopředu:

- můžete přestupovat sami, pokud jste dostatečně pohybliví a máte dost silnou horní část těla,
- přisuňte vozík co možná nejbližší k novému posedu, zadní kola zablokujte a nadzvedněte tělo k sedadlu,
- přestupujete-li sami, pak máte pod tělem malou nebo vůbec žádnou oporu. Pomozte si proto, pokud je to možné, nějakým prkýnkem.

Naklonění dopředu

Nastavte přední kola tak, aby směřovala dopředu a zatáhněte ruční brzdy. V žádném případě se nenaklánějte dále dopředu, než po konec područky.

Pro bezpečné naklonění dopředu je podstatné správné postavení. Musíte především správně natočit přední kola, abyste udrželi stabilitu.

Nepokoušejte se dosáhnout na předměty, musíte-li se kvůli tomu naklonit dopředu mezi kolena!

Zaklonění dozadu

Popojedte vozíkem co nejbližší k dotyčnému předmětu. Vytočte přední kola dopředu, abyste dosáhli co největšího rozchodu kola vozíku. Nakloňte se dozadu pouze na vzdálenost Vaší ruky, aniž byste přitom změnili polohu sedu.

Nezatahujte ruční brzdy. Je lepší, když případně popojedete kousek dozadu, než abyste přitom změnili polohu sedu.

Rozložení vozíku

Zatlačte na trubky, kde je upevněn sedák, až se sedadlo rozevře. Nikdy vozík neroztahujte tlačím na područky – hrozí jejich vylomení!

Skládání vozíku

Vyklopte podnožky nebo sklopte stupačky (v případě spojené podnožky vyklopte stupačku), aby nedošlo k zapříčení kříže vozíku. Uchopte sedák vpředu a vzadu uprostřed do obou rukou a nadzvedněte jej (jako když chcete vozík za potah zvednout ze země).

Postranice

Odnímatelné postranice mají tu výhodu, že lze z vozíku snadno nastupovat nebo vystupovat ze strany. Postranice jsou v normální poloze zajištěny. Pokud máte na vozíku výškově stavitelné postranice, můžete si jejich výškové nastavení regulovat sami. Je pro to nutné povolit zajišťovací páčku umístěnou před postranicí a poté je možné posouváním v trubce područku nastavit. Po optimálním vytažení nebo zasunutí opět područku zajistěte.

Podnožky

Podnožky jsou u vozíku odnímatelné či sklopné do strany. Délku podnožky lze individuálně nastavit na míru délky holeně tak, že uvolníme šroubové spojení a spodní část (stupačku) zasuneme, případně vysuneme. Poté, co jste nastavili potřebnou délku, vložte do nejbližší možné díry šroub a utáhněte. Při nastupování či vystupování z nebo na vozík musíte vždy podnožky buď vyklopit nebo alespoň zvednout spodní část (stupačky) obou podnožek.

Nikdy se na tyto stupačky nestavějte – hrozí nebezpeční překlopení!

V případě, že máte na vozíku výškově stavitelné podnožky, můžete si jednoduchou manipulací nastavit jejich sklon a polohu. Samozřejmě i pro tento typ podnožek platí nastavení jejich délky.

Rychloupínací osy

Rychloupínací osy kol umožňují větší skladnost vozíku. Uchopte vozík za rukojeť, nadzvedněte jej, druhou rukou stiskněte na středu kola tlačítko a kolo vytáhněte. Při jeho nasazování musíte opět stisknout pojistku a kolo zpět nasadit.

Údržba

Na údržbu a čištění vozíku používejte vždy jen měkké látky a šetrné tekuté čisticí prostředky. Nepoužívejte rozpouštědla, silikonové spreje, leštící vosk ani jiné agresivní prostředky.

Přibližně jednou týdně kontrolujte tlak pneumatik (je uveden na vnější straně pneu) a v případě, že jsou pláště příliš opotřebovány či popraskány, je nutné je vyměnit.

UPOZORNĚNÍ:

V záruční době je zakázáno jakýmkoli způsobem zasahovat do částí vozíku nebo je jinak opravovat, mimo opravnu firmy SIVAK.

V opačném případě Vám nebude záruka uznána. Reklamací vždy nahlašujte písemně. Přesné podmínky záruky jsou specifikovány v záručním listě, který jste obdrželi spolu s Vaším vozíkem.

MARIE VIŠKOVÁ

J. Masaryka 1713

500 12 Hradec Králové

tel.: 495 220 684

fax: 495 221 327

www.sivak.cz

e-mail: sivak@sivak.cz

střediska firmy SIVAK:

- Nádražní ul. 82, 701 00 Ostrava
- ÚSP Hrabyně, 747 67 Hrabyně

tel/fax: 59 611 53 29

tel/fax: 553 775 002

NÁVOD NA PROVOZ MECHANICKÉHO VOZÍKU Šárka Blade

Tento mechanický vozík je skládací. Abyste jej mohli rozložit, postavte se vedle vozíku, trochu ho nakloňte k sobě tak, aby se vnější kola nezdvihla od podlahy, a pak stlačte vnitřní trubky sedadla dolů tak, až se vozík úplně roztáhne. Potahy jsou zpracovány na předpětí, takže se může stát, že Váš vozík získá úplnou šířku sedadla teprve během používání. Chcete-li vozík složit, nejprve sundejte nebo alespoň sklopte podnožky. Nejlepší je postavit se vedle vozíku a táhnout za sedák nahoru k sobě tak, až je vozík zcela složený.

Opěrky nohou – podnožky

Opěrky nohou jsou u vozíku odnímatelné a sklopné do strany. Délku opěrky lze individuálně nastavit na míru délky holeně tak, že uvolníme objímku trubky a spodní část opěrky nohou (zasouvací trubku) zasuneme, případně vytáhneme. Správně sedíte tehdy, jestliže nohy spočívají na stupátkách a mezi stehem a podložkou je místo asi tak na šířku ruky. Poté, co jste nastavili délku podnožek, přitáhněte opět pevně objímku trubky. Pro lepší nastupování se sklopná stupátka vyklápějí směrem nahoru.

Boční díly – postranice

U vozíku lze postranní díly sundávat. Odnímatelné postranice poskytují tu výhodu, že lze do vozíku snadno nastupovat ze strany, případně z něj vystupovat nebo přestupovat. U vozíku jsou odnímatelné boční díly v normální poloze zajištěny. Aby se daly sundat, musíte stisknout bezpečnostní tlačítko na vnější straně.

Vlastní jízda

Nejdříve si udělejte ve vozíku pohodlí a posadte se co možno nejdále dozadu. Nohy spočívají na stupátkách (dejte pozor na správné nastavení výšky podnožek dle individuálních rozměrů holeně). Vozíkem pohybujete pomocí úchopných obručí na velkých kolech.

Brzdy

Pro zastavení vozíku je vpravo a vlevo na hnacím kole umístěna vždy jedna aretační brzda. Pohybem páky dopředu můžete vozík brzdít postupně. Jestliže páku stlačíte úplně dopředu, kola se zablokují a vozík se zastaví. Protože brzdy působí přímo na kola, dbejte vždy na to, aby byl v pneumatikách dostatečně velký tlak vzduchu, aby brzdy neztrácely účinnost.

Upozornění!

V záruční době je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do částí vozíku nebo jej jinak opravovat, mimo záruční opravnu firmy SIVAK. V opačném případě na vozík nebude uznána záruční doba.

Výhradní obchodní a servisní zastoupení pro ČR:

SIVAK medical technology s. r. o.

Jana Masaryka 1713

500 12 Hradec Králové

tel.: 495 220 684, fax.: 495 221 327

www.sivak.cz

Střediska:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| • Nádražní 82, 701 00 Ostrava | tel.: 596 115 329 |
| • ÚSP Hrabyně, 747 67 | tel.: 553 775 002 |
| • Na Topolce 1, 140 00 Praha | tel.: 261 211 788 |