

HORIZONT – NARE s.r.o.

Vodní 342/5 , 737 01 Český Těšín

Česká republika

PD 11006

NÁVOD K POUŽITÍ



SCHODOLEZU **CLIMBER** MK 1

mobilního pásového zařízení s obsluhou ,
pro překonání architektonických bariér imobilními osobami

výrobce S.A.B. Technology s.r.o.

Tento návod slouží zároveň jako záruční list, proto ho pečlivě uschovejte

• STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ

Schodolez **CLIMBER 1** je určen pro osoby přepravující se na mechanickém vozíku, a to pro překonání architektonických bariér – schodišť.

Vyznačuje se vysokou kvalitou a užitnou hodnotou při současném zachování maximální jednoduchosti a lehkosti obsluhy.

Velký důraz, při vývoji českými konstruktéry, byl kladen na bezpečnost při provozu. Toto zajišťuje pevná a robustní konstrukce při zachování minimálních vnějších rozměrů.

• ORIENTAČNÍ POPIS ČÁSTÍ SCHODOLEZU



1. kormidlo schodolezu
2. nastavitelná podpěra hlavy
3. nastavitelné úchyty pro mechanické vozíky
4. spínače pohybu – směr dolů, nahoru a blokovací bezpečnostní tlačítko
5. podpěra kol pro mechanické vozíky
6. horní kryt
7. kola pro snadnou manipulaci na rovné podestě
8. konektor pro nabíjení baterie
9. síťový adaptér 12V s koncovkou
10. bod naklonění schodolezu
11. pákový mechanismus zachycení kormidla k podvozku
12. přepínač chodu bez kormidla
13. přepínač zapnutí schodolezu nebo nabíjení akumulátoru
14. kontrolka stavu baterie

• NUTNÉ PODMÍNKY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ

- ➔ schodolez CLIMBER 1 mohou používat pouze osoby , které byly řádně zaškoleny zaměstnanci dodavatele nebo výrobce .
- ➔ zařízení nesmí obsluhovat osoba mladší 15-ti let .
- ➔ nepoužívejte schodolez na kluzkých , mokrých schodech nebo na povrchu , který není kompaktní (rozbité schody , schody pokryté kobercem , apod...) .
- ➔ před provozem schodolezu s uživatelem řádně zkontrolujte bezpečné zajištění vozíku a uživatele, a taktéž celkovou stabilitu schodolezu s uživatelem (těžiště) na vodorovné ploše .
- ➔ při přepravě uživatele na vodorovném úseku bez překážek je doporučeno přejít na nepásový (kolový) chod schodolezu .
- ➔ maximální povolený překonávaný sklon je indikován přiloženým sklonoměrem .
- ➔ příčný sklon dráhy musí být 0 stupňů (tzn. bez naklonění přepravované osoby na pravou nebo levou stranu) .
- ➔ schodolez nepoužívejte na točitém schodišti .
- ➔ nosnost zařízení max. 130kg (viz štítek) .
- ➔ souvislý provoz se zatížením 120 kg je garantován s plně nabitou baterií po dobu 30-ti minut .
- ➔ zařízení je určeno pouze pro převoz osob se sníženou pohyblivostí na mechanických vozících .
- ➔ je zakázán převoz nákladů, zboží, spotřebičů a osob bez mechanického vozíku.
- ➔ převoz osob na elektrickém vozíku je zakázán.

• DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE

- ✘ po převzetí zařízení si pozorně přečtete tento manuál a dbejte uvedených pokynů .
- ✘ pro provoz s více druhy vozíků, je nutné vždy nastavit jednotlivé úchyty na konkrétní jednotlivý vozík, a to prodejcem nebo výrobcem zaškolenou osobou .
- ✘ je zakázáno upravovat, neodborně opravovat či jinak neoprávněně zasahovat do zařízení . Toto mohou činit pouze kvalifikovaní odborníci dodavatele .
- ✘ nevystavujte baterii extrémním teplotním výkyvům .
- ✘ 12V nabíječka baterie, která je umístěna mimo schodolez , je určena pro zajištění řádného nabíjení baterie s důrazem na maximální šetrnost .
- ✘ Nepoužívejte jiné typy nabíječek, než výrobcem k zařízení dodané !
- ✘ Po světelné signalizaci o použitelnosti schodolezu (rozsvítí se zelená kontrolka na nabíječce) můžete ukončit dobíjení baterie změnou polohy prepínače a vyjmutím konektoru nabíječky ze schodolezu .
- ✘ Doporučujeme však, pro dosažení maximální kapacity baterie a tím i prodloužení doby použitelnosti schodolezu, pokračovat v nabíjení i po této signalizaci, a to přibližně dalších 12 hodin .

- ✘ Vyplní baterie je ze zdraví nebezpečných látek . POZOR ! Neotevírejte či jinak nezasahujte do baterie ! V případě problému volejte níže uvedenou asistenci dodavatele .

SOS - TECHNICKÁ PODPORA

604 687 730

Garant servisu :
HORIZONT-NARE s.r.o.

Informace pro uživatele

1. UVEDENÍ SCHODOLEZU DO AKTIVNÍHO STAVU

Vsuňte klíček do zámku přepínače(13) a otočte jím ve směru hodinových ručiček .
Bez aktivace klíčkem nelze schodolez použít !

2. MOŽNOSTI MANIPULACE SE SCHODOLEZEM NA VODOROVNÝCH ÚSECÍCH

Ke snadnému pohybu na vodorovném úseku bez překážek, slouží postranní kolečka (7), která tak umožňují fyzicky nenáročnou manipulaci se zařízením i s přepravovanou osobou .

Lehkým naklopením kormidla a tím i celého schodolezu k sobě, se pásy schodolezu odpoutají od podlahy . Tím vznikne možnost manipulace s použitím koleček . Je možno manipulovat se schodolezem současně i s přepravovanou osobou .

Po zpětném odklopení kormidla a tím i celého schodolezu od sebe , dojde ke styku pásů s podlahou . Tím získáte opětnou možnost použít motorový pohon .

Při pohybu na schodišti postranní kolečka kopírují schody a nepřekáží pásovému mechanismu .

Případné překážky mimo schodiště zásadně překonávejte zpětným chodem schodolezu !

3. SPOJENÍ OBOU ČÁSTÍ SCHODOLEZU

Schodolez se skládá ze dvou částí – podvozku a tzv. kormidla .

Obě části je nutné před použitím schodolezu bezpečně spojit .

Po použití je možné schodolez opět rozložit a přepravovat např. i v osobním automobilu .

Jak připojit kormidlo k podvozku:

- a. Postavte se čelem k zadní části podvozku .
- b. Uchopte kormidlo a opatrně jej nasuňte na zachycovací jamku na podvozku .
- c. Přiklopte kormidlo k sobě až dojde k zacvaknutí pákového mechanismu (11) .
- d. Překontrolujte , zda nelze odklopit kormidlo od sebe !
- e. Otočte klíčkem přepínače (13) ve směru hodinových ručiček .
- f. Stiskněte spínač pohybu na kormidle. V případě, že se zařízení nedá do pohybu, proveďte kontrolu :
 1. Zda svítí kontrolka stavu baterie –
 - a. pokud svítí červené diody , proveďte nabití baterie přiloženou nabíječkou .
 - b. pokud nesvítí vůbec , volejte svému prodejci nebo výše uvedeného garanta servisu .
 2. Není-li zablokováno bezpečnostní červené tlačítko – odblokování provedete pootočením tlačítka .

Jak opět provést demontáž kormidla od podvozku:

- a. Doporučujeme před manipulací vypnout přepínačem (13) schodolez a vytáhnout klíček z přepínače .
- b. Postavte se čelem k zadní části podvozku .
- c. Vložte nohu pod zadní část . Patou se opřete o podlahu . Špičku zasuněte mezi osu horních koleček a páku zachycovacího mechanismu (11) .
- d. Lehce zatlačte špičkou na páku (11) .
- e. Odklopte kormidlo směrem od sebe .
- f. Vytáhněte kormidlo ze zachycovací jamky a oddalte od podvozku .

4. JAK POUŽÍVAT SCHODOLEZ K PŘEKONÁVÁNÍ BARIÉR

A) Jak bezpečně připojit přepravovanou osobu na mechanickém vozíku ke schodolezu:

- 1) Zkompletovaným schodolezem zajedťte pod zadní část mechanického vozíku , jehož kola musí být zabržděna .
- 2) Postavte se čelem k zadní části podvozku .
- 3) Vložte nohu pod zadní část . Patou se opřete o podlahu . Špičku zasuňte mezi osu horních koleček a páku zachycovacího mechanismu (11) .
- 4) Lehce zatlačte špičkou na páku (11) .
- 5) Odklopte kormidlo směrem od sebe .
- 6) Oběma úchyty (3) provedťte připevnění vozíku ke kormidlu dle bodů 7 a 8 .
- 7) Natáhněte a zajistěte pružinové jističe v natažené poloze , rozteč úchytů nastavíte na vnitřní rozpětí madel vozíku .
- 8) Po zajetí vozíku nad úchyty povolíte pružinové jističe a zajistíte vozík . Úchyty zabezpečí bezpečné připojení konstrukce vozíku ke kormidlu .
- 9) Zapněte bezpečnostní pás přepravované osobě .
- 10) Naklopte kormidlo s přepravovanou osobou na sebe . Při tom si můžete pomoci opřením nohy o osu vrchních koleček . Páka mechanického zajištění (11) musí zacvaknout .

B) Odpoutání přepravované osoby na vozíku od schodolezu:

- 1) Zastavte na rovném místě s dostatkem volného prostoru .
- 2) Postavte se čelem k zadní části podvozku .
- 3) Vložte nohu pod zadní část . Patou se opřete o podlahu . Špičku zasuňte mezi osu horních koleček a páku zachycovacího mechanismu (11) .
- 4) Lehce zatlačte špičkou na páku (11) .
- 5) Odklopte kormidlo směrem od sebe tak , až bude vozík naklopen zpět na kola . Opět si můžete pro lepší stabilitu pomoci opřením nohy o osu horních koleček .
- 6) Uvolněte bezpečnostní pás .
- 7) Odjistěte úchyty , uvolněte vozík od kormidla a odbrzděte kola mechanického vozíku.
- 8) Připojte kormidlo zpět ke schodolezu a vyjedťte se schodolezem zpod vozíku .

C) Pohyb se schodolezem po schodech směrem nahoru:

- 1) Připevněte vozík s přepravovanou osobou ke schodolezu viz. Bod A .
- 2) Přijed'te zpětným chodem (kormidlo zařízení bude u schodů a obsluha bude stát zády ke schodišti) se schodolezem ke schodišti .
- 3) Stiskněte tlačítko pro stoupání (šipka k sobě) a držte ho .
- 4) Během stoupání kontrolujte polohu náklonu schodolezu i přepravované osoby .
- 5) V případě nesnázi pusťte tlačítko chodu nebo stiskněte červené bezpečnostní tlačítko STOP, které je umístěno vedle tlačítek ovládání chodu .
- 6) Po vyjetí schodiště až k bodu sklopení (je vyznačen na schodolezu), sklopte celý schodolez směrem na sebe a připravte (odjetím na rovnou plochu) přepravované osobě dostatek prostoru pro odpoutání od schodolezu .
- 7) Odpoutejte přepravovanou osobu ze zařízení viz. Bod B .

D) Pohyb se schodolezem po schodech směrem dolů:

- 1) Připevněte vozík s přepravovanou osobou ke schodolezu viz. Bod A .
- 2) Přijed'te chodem vpřed (tlačítko s šipkou od sebe) ke schodišti až k bodu sklopení (je vyznačen na schodolezu) .
- 3) Sklopte celý schodolez směrem od sebe až na schodiště .
- 4) Stiskněte tlačítko pohybu pro chod vpřed (tlačítko s šipkou od sebe) .
- 5) Během klesání kontrolujte polohu náklonu schodolezu i přepravované osoby .
- 6) V případě nesnázi pusťte tlačítko chodu nebo stiskněte červené bezpečnostní tlačítko STOP, které je umístěno vedle tlačítek ovládání chodu .
- 7) Po dojetí na rovnou plochu pod schodištěm proved'te odpoutání přepravované osoby ze zařízení viz. Bod B .

5. DOBÍJENÍ BATERIE

Nabíječka baterie 12V je z bezpečnostních důvodů umístěna mimo schodolez . Pro dobíjení je zapotřebí připojit nabíječku (9) do zásuvky 220V a zapojit konektor do zásuvky na schodolezu (8).

Poté otočte přepínačem s klíčkem (13) proti směru hodinových ručiček . V případě, že svítí na nabíječce červená kontrolka, je baterie dobíjena .

V případě, že svítí na nabíječce zelená kontrolka, je možné nabíjení přerušit a po odpojení konektoru nabíječky a přepnutí přepínače (13) schodolez opět používat – více o nabíjení baterie výše v informacích pro uživatele .

Upozorňujeme . že pokud je přepínač ve volbě nabíjení, je z bezpečnostních důvodů vyřazena

6. BĚŽNÁ ÚDRŽBA PROVÁDĚNÁ PROŠKOLENOU OBSLUHOU

Schodolez model CLIMBER 1 je nenáročný na údržbu , kontrolujte pravidelně dle níže uvedených bodů .

Schodolez

ⓘ Pravidelně vizuálně kontrolujte případné mechanické poškození - při jakémkoliv výskytu nebo podezření na výskyt , volejte svému prodejci nebo garantu servisu!

ⓘ Kontrolujte stav pásů – případné poškození nebo výrazné opotřebení nahlaste svému prodejci nebo garantu servisu .

ⓘ Udržujte schodolez v čistotě !

ⓘ Zacházejte se schodolezem šetrně – zvýšíte jeho životnost !

Baterie a elektrické zapojení

ⓘ Kontrolujte pravidelně stav nabití akumulátoru! Pokud při nabitém stavu baterie není provozní doba schodolezu v rámci garantované hodnoty , kontaktujte svého prodejce nebo garantu servisu .

ⓘ V případě, kdy schodolez není delší dobu používán, je nutné baterii pravidelně 1x měsíčně dobíjet, jinak dochází k jejímu znehodnocení !

ⓘ Nezasahujte nikdy samovolně do elektrického rozvodu schodolezu . Případnou poruchu nebo poškození nahlaste svému prodejci nebo garantu servisu .

Jakékoli neodborné zásahy do zařízení jsou z bezpečnostních důvodů přísně zakázány .

Údržbu mohou provádět pouze pověřeni zaměstnanci dodavatele .

7. ZÁRUKA A PRAVIDELNÉ POZÁRUČNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKY

Vznikne-li závada z důvodu jiného způsobu používání schodolezu než je uvedeno v tomto návodu , tak se na toto poškození záruka nevztahuje .

Běžná délka záruční doby je 24 měsíců .

Pro zajištění bezporuchového a bezpečného provozu je nutné provádět pravidelné roční pozáruční servisní prohlídky , které zajistí garant servisu společnost HORIZONT-NARE s.r.o.

Nejsou-li tyto pravidelné pozáruční servisní prohlídky prováděny ve výrobcem stanovených intervalech , neodpovídá prodejce nebo výrobce za žádné škody vzniklé na zdraví osob nebo majetku , které by vznikly používáním tohoto zařízení .

Náklady na provádění pravidelných pozáručních servisních prohlídek jdou na vrub uživatele .

Kontaktujte , prosím , garanta servisu společnost HORIZONT-NARE s.r.o. na tel.č. :

PRAVIDELNÉ POZÁRUČNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKY
596 891 012, 800 101 073, 604 687 730
GARANT SERVISU - HORIZONT-NARE s.r.o.

Po ukončení životnosti stroje je uživatel povinen kontaktovat z důvodu ekologické likvidace stroje dodavatele, který zajistí bezplatnou ekologickou likvidaci stroje dle zákona o likvidaci odpadu!